

10738-MASCARILLA HIGIENICA HOMOLOGADA TELA LAVABLE 30Ud

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO.

1.1. Identificación del envase.

Nombre: Mascarilla higiénica homologada tela lavable 30 un

Código interno: 51822

2. DESCRIPCIÓN.

Mascarilla de tejido lavable, de 5 capas. Homologada según la norma EN 14683:2019 + AC:2019. Puede lavarse en lavadora o a mano, y desinfectar con solución de hipoclorito 0,1% (agua con lejía- ver instrucciones al final del documento).

Su diseño ergonómico, con bandas elásticas, facilita el ajuste y comodidad en su manejo y utilización.

Aspecto: mascarilla de tela rectangular con gomas

Color: blanco

Origen: Fabricación 100% nacional

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

5 capas:

- 80 g/m²; 100 % Polipropileno hidrófobo spunbond (2 capas) (Parte exterior mascarilla)
- 88 g/m²; 80 % Poliéster / 20 % viscosa spunlace (2 capas)
- 20 g/m²; 100 % Polipropileno hidrófobo spunbond (1 capa) (Parte interior mascarilla)

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Composición | 53% Polipropileno, 37% Poliester, 10% viscosa | ISO 1833 |
| Peso total g/m ² | 188 g/m ² | EN 12127 |
| Construcción tejido | TNT- Tejido sin tejer | BS 5441 |

Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 puntos 5.2.2, 5.2.3

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Eficiencia de filtración bacteriana BFE (%) | 98,13 (±0,73) | EN 14683:2019 + AC:2019 |
| Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm ²) | 30 (±3) | |
| Nº de informe AITEX | 2020TM0700 | |
| Nº de informe lavado EUROFINIS | AR-20-YL-002376-01 | |

4. ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS.

10738-MASCARILLA HIGIENICA HOMOLOGADA TELA LAVABLE 30Ud

medidas 9.5 x 18 cm. Color Blanco.

5. DATOS FÍSICO-QUÍMICOS.

Sin datos disponibles.

6. USOS.

Las *mascarillas higiénicas* estas están destinadas a personas, adultos o niños según el caso, sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento técnico “*Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19*” publicado por el Ministerio de Sanidad.

Tanto en la UNE 0064:2020 como en la UNE 0065:2020 se establece claramente que las *mascarillas higiénicas* no deben considerarse un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425. Se definen por tanto como un “*Producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas*”.

Instrucciones de colocación:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Identificar la parte superior de la mascarilla.


3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.

10738-MASCARILLA HIGIENICA HOMOLOGADA TELA LAVABLE 30Ud

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.

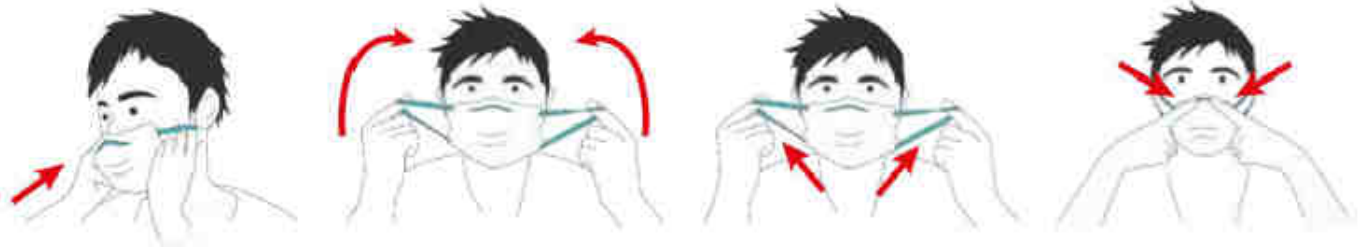

7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.

Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



BIBLIOGRAFIA: Especificación UNE 0065:2020

7. OBSERVACIONES.

Almacenamiento: Almacenar en sitio fresco al abrigo de la luz, en lugares secos y ventilados. Mantener bien seca.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h, aunque puede prolongarse si la posibilidad de contagio es baja y fuera necesario hasta un máximo de 8 horas, pero la posibilidad de contagio aumenta. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Ref: **Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers.** Abrar Ahmad Chughtai, Sacha Stelzer-Braid, William Rawlinson, Giulietta Pontivivo, Quanyi Wang, Yang Pan, Daitao Zhang, Yi Zhang, Lili Li & C. Raina MacIntyre . BMC Infectious Diseases volume 19, Article number: 491 (2019)

Según indicaciones del fabricante: Puede lavarse un máximo de 5 veces, tanto en lavadora como a mano. Hay que distinguir entre el lavado de la mascarilla y la desinfección de la misma.

El lavado debe hacerse cuando la mascarilla esté sucia, haya sufrido salpicaduras, o se haya desinfectado ya varias veces.

La desinfección debería realizarse tras cada uso de la mascarilla.

Lavado de la mascarilla: Utilizar agua y jabón. Si es en lavadora no sobrepasar los 60°C y utilizar el programa de ropa delicada. Si es a mano, enjuagar con agua y jabón, frotar con cuidado, y escurrir el agua con cuidado de no deformar la mascarilla.

10738-MASCARILLA HIGIENICA HOMOLOGADA TELA LAVABLE 30Ud

- 1.- **Método de desinfección:** medir 1 litro de agua corriente con dos cucharadas soperas de lejía (25 a 30ml). Mezclar bien, y dejar la mascarilla en esta solución al menos 15 minutos. Posteriormente dejar secar por completo y utilizar.
- 2.- **Método de desinfección:** Esterilización mediante calor seco en horno de convección, calentando a 70° C durante 30 minutos; este método tuvo el menor efecto en dañar el mecanismo de filtración, y el efecto de filtración pudo mantenerse por encima del 95%.

Eliminación de la mascarilla:

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.



Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.